



Air ProtexTM

Un concentré de technologie pour votre sécurité

MASQUE GRAND PUBLIC CATEGORIE 1



NOTICE D'UTILISATION

Avertissement : pour protéger votre santé et celle des autres, il est très important de respecter cette notice d'utilisation

- Portez ce masque dès que vous êtes en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez
- Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez
- Attention : si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.
- Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant.
- Ce masque ne remplace pas les gestes barrières qu'il faut maintenir : lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes. Il ajoute une barrière physique.

COMMENT PORTER LE MASQUE ?

Avant de le mettre :

1. Avant de toucher le masque lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique
2. Inspectez le masque et assurez-vous qu'il n'y a pas de trous, déchirures ou dégradations
3. Ne modifiez jamais le masque de quelque façon que ce soit

Pour le mettre :

1. Tenez le masque par la/les lanière(s) élastique(s) et placez-le au niveau de votre bouche, enfin, étirez la/les lanière(s) élastique(s) derrière votre tête
2. Faites un réglage très souple de l'élastique, ne serrez pas. Le masque doit être posé, pas plaqué.
3. Positionnez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton
4. Vous pouvez insérer une barrette nasale ou de type alimentaire (attache sachet de pain de mie par exemple)

Lorsque vous le portez :

1. Evitez de le toucher et de le déplacer
2. Ne le mettez jamais en position d'attente sur le front, le menton ou autour du cou

Il faut changer le masque :

1. Lorsque vous l'avez porté 4 heures
2. Lorsque vous souhaitez boire ou manger
3. Si vous avez du mal à respirer
4. Si le masque s'humidifie
5. Si le masque est endommagé
6. Si le masque est déformé et ne tient plus correctement

Pour l'enlever :

1. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique
2. Retirez la/les élastique(s) pour décoller le masque de votre visage
3. En attendant de le laver, isolez-le dans un sac en plastique dédié ; ou, si le masque est usé, jetez-le dans une poubelle qui se ferme
4. Pour terminer, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique

